

# Anbindung DOTsnap an Turbomed

---

## Anbindung DOTsnap an Turbomed

DOTsnap GDT Einstellungen

TurboMed Einstellungen

PACS Aufruf

Tab 'Übersicht'

Tab 'Export'

Tab 'Import'

Tab 'GDT 2.1'

PACS Auftrag

Tab 'Übersicht'

Tab 'Export'

Tab 'Import'

Tab 'GDT 2.1'

# DOTsnap GDT Einstellungen

- DOTsnap wie gewohnt installieren und starten.
- Über das Zahnrad oben rechts das Einstellungsfenster öffnen.
- Dort folgende Änderungen vornehmen:



GDT DICOM Archiv Ansicht Lizenz

GDT Import Pfad  
C:\GDT

Auswählen 

GDT Export Pfad  
C:\GDT

Auswählen 

GDT Zeichensatz  
IBM437 ▼

GDT Export ID  
TurboMed

GDT Import Datei  
DSTUMD.gdt

GDT Export Datei  
TUMDDS.gdt


Dokumente per GDT zurückgeben

GDT bei Import erzeugen


GDT bei Auftrag erzeugen

# TurboMed Einstellungen

- Turbomed starten, Patienten aufrufen und über F3 in die Karteikarte wechseln.
- Über den Menüpunkt 'Geräte | Einstellungen GDT-Schnittstelle' öffnet sich eine Liste aller GDT Geräte.

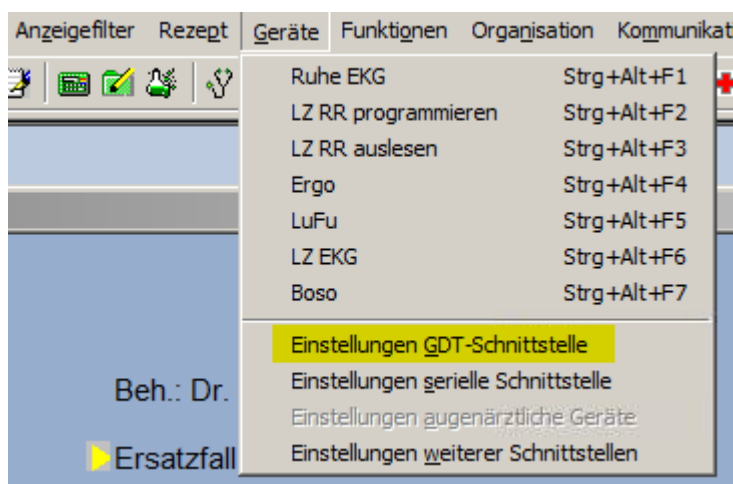

- Den Button 'Gerät anbinden' anklicken.
- Es öffnet sich nun das GDT Einstellungsfenster. Über den Button 'Kopieren' kann eine neue Einstellung angelegt werden.

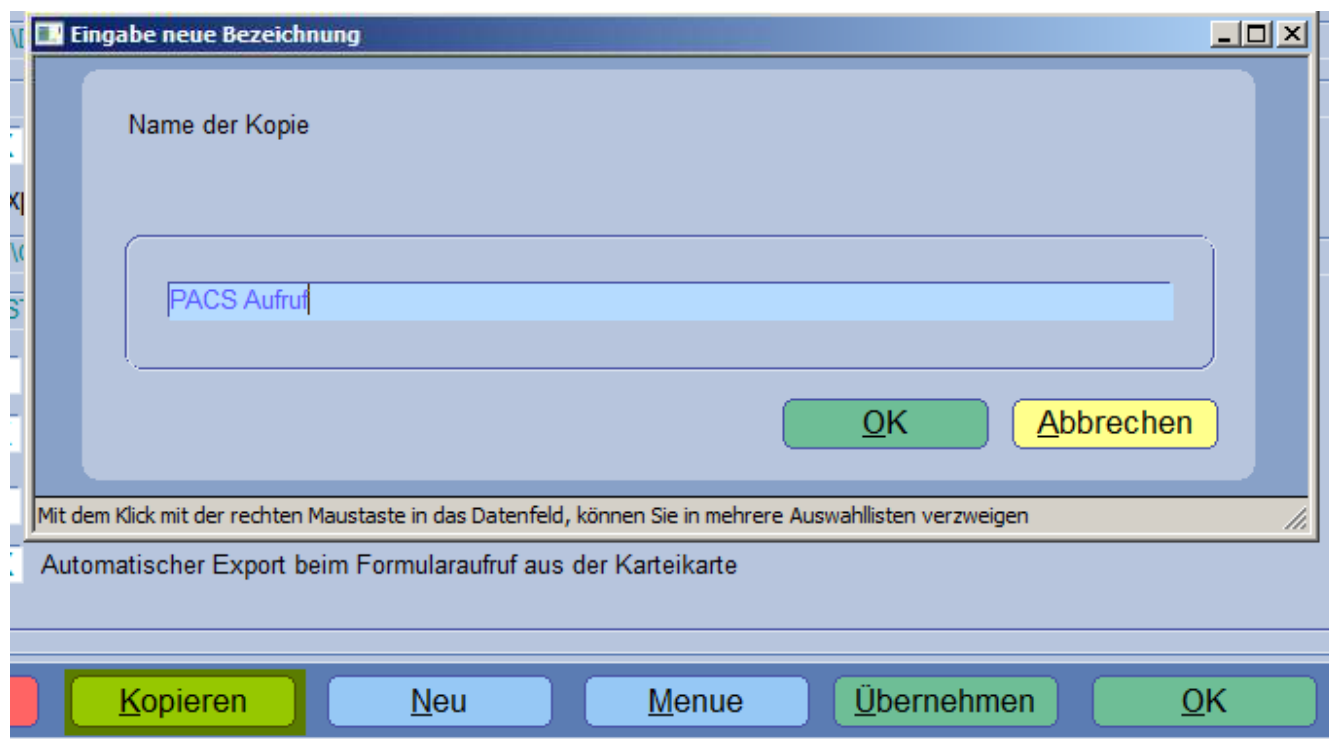

# PACS Aufruf

Über den Button 'Kopieren' wird nun zuerst der 'PACS Aufruf' eingerichtet.

## Tab 'Übersicht'

<b>Übersicht</b>		<b>Export</b>	<b>Import</b>	<b>GDT 2.1</b>
Name	<input type="text" value="PACS Aufruf"/>	<input type="text" value="PACS Aufruf"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/> GDT Anbindung 2.1 nutzen			
Programm	<input type="text" value="C:\DOTsnap\DOTsnap.exe"/>			
Parameter	<input type="text"/>			
	<input checked="" type="checkbox"/> Programm aufrufen beim Export			
Export		Import		
Pfad	<input type="text" value="C:\GDT"/>	<input type="text"/>		
Dateiname	<input type="text" value="DSTUMD.gdt"/>	<input type="text"/>		
	<input type="checkbox"/> Beim Export aus dem Menü Formular anzeigen	<input type="checkbox"/> Import nur manuell		
	<input checked="" type="checkbox"/> Automatischer Export beim Formularaufruf aus dem Menü	<input type="checkbox"/> Beim Import Formular anzeigen		
	<input type="checkbox"/> Beim Export aus der Karteikarte Formular anzeigen			
	<input checked="" type="checkbox"/> Automatischer Export beim Formularaufruf aus der Karteikarte			

## Tab 'Export'

<b>Übersicht</b>		<b>Export</b>	<b>Import</b>	<b>GDT 2.1</b>
GDT-ID Empfänger	<input type="text" value="DOTSNAP2"/>			
GDT-Version	<input type="text" value="02.10"/>			
Zeichensatz	<input type="text" value="IBM[Standard] CP 437"/>			
Satzart	<input type="text" value="6301"/>			
8402	<input type="text" value="ALLG00"/>			
8410	<input type="text"/>			
Patientenkennung	<input type="text" value="Pat. Nr."/>			
Arztkennungen Ansicht	<input type="text" value="4 : Dr. med. Ingrid Doerk"/>			
	<input type="checkbox"/> Bei Rücksprung nur Pat.Nr. senden			
Grösse/Gewicht	<input type="checkbox"/>			
Dezimalzeichen	<input type="text" value="Punkt"/>			

## Tab 'Import'

Übersicht	Export	Import	GDT 2.1
<b>Zeichensatz</b> <input type="checkbox"/> 9206 <input type="checkbox"/> IBM/OEM <input checked="" type="checkbox"/> ANSI		<b>Artspalte Kartei</b> <input type="checkbox"/> Formulareintrag <input type="text" value="DS"/> <input type="checkbox"/> Texteintrag <input type="text" value="DS"/> <input type="checkbox"/> Rücksprung <input type="text" value="DS"/> <input type="checkbox"/> GDT 2.1 Hyperlinkeintrag <input type="text" value="DS"/>	
<b>Eintragsdatum</b> <input type="checkbox"/> Aktuelles Tagesdatum <input type="checkbox"/> Untersuchungsdatum (Feldkennung 6200) <input checked="" type="checkbox"/> Abnahmedatum (Feldkennung 8432)		<b>Sonderfunktionen</b> <input type="text" value=""/>	
<b>Arztkennung</b> <input type="checkbox"/> Arztkennung verwenden			
<b>Meldung</b> <input checked="" type="checkbox"/> Bei Abweichungen vom Standard Meldung ausgeben			

## Tab 'GDT 2.1'

Übersicht	Export	Import	GDT 2.1
<b>Hyperlink</b> <input checked="" type="checkbox"/> Datei nicht kopieren <input type="checkbox"/> Datei auf Server kopieren <input type="checkbox"/> Datei auf Server kopieren und löschen		<b>Speicherpfad</b> <input checked="" type="checkbox"/> TurboMed\Dokumente <input type="checkbox"/> Anderer <input type="text" value=""/> <input checked="" type="checkbox"/> JahrMonat	
<b>Karteieintrag</b> <input checked="" type="checkbox"/> Karteieintrag nach Typ		<b>Dateiimportpfad</b> <input type="text" value=""/>	

# PACS Auftrag

Über den Button 'Kopieren' nun den 'PACS Auftrag' anlegen.

## Tab 'Übersicht'

Übersicht Export Import GDT 2.1

Name **PACS Auftrag** PACS Auftrag

GDT Anbindung 2.1 nutzen

Programm C:\DOTsnap\DOTsnap.exe

Parameter

Programm aufrufen beim Export

Export Import

Pfad C:\GDT C:\GDT

Dateiname DSTUMD.gdt TUMDDS.gdt

Beim Export aus dem Menü Formular anzeigen  Import nur manuell

Automatischer Export beim Formularaufruf aus dem Menü  Beim Import Formular anzeigen

Beim Export aus der Karteikarte Formular anzeigen

Automatischer Export beim Formularaufruf aus der Karteikarte

## Tab 'Export'

Übersicht Export Import GDT 2.1

GDT-ID Empfänger **DOTSNAP2**

GDT-Version 02.10

Zeichensatz IBM[Standard] CP 437

Satzart 6301

8402 ALLG00

8410

Patientenkennung Pat. Nr.

Arztkennungen Ansicht 4 : Dr. med. Ingrid Doerk

Bei Rücksprung nur Pat.Nr. senden

Grösse/Gewicht

Dezimalzeichen Punkt

## Tab 'Import'

Übersicht	Export	Import	GDT 2.1
<b>Zeichensatz</b> <input type="checkbox"/> 9206 <input type="checkbox"/> IBM/OEM <input checked="" type="checkbox"/> ANSI		<b>Artspalte Kartei</b> <input type="checkbox"/> Formulareintrag DS <input checked="" type="checkbox"/> Texteintrag DS <input checked="" type="checkbox"/> Rücksprung DS <input type="checkbox"/> GDT 2.1 Hyperlinkeintrag DS	
<b>Eintragsdatum</b> <input type="checkbox"/> Aktuelles Tagesdatum <input type="checkbox"/> Untersuchungsdatum (Feldkennung 6200) <input checked="" type="checkbox"/> Abnahmedatum (Feldkennung 8432)		<b>Sonderfunktionen</b> [Dropdown]	
<b>Arztkennung</b> <input type="checkbox"/> Arztkennung verwenden			
<b>Meldung</b> <input checked="" type="checkbox"/> Bei Abweichungen vom Standard Meldung ausgeben			

## Tab 'GDT 2.1'

Übersicht	Export	Import	GDT 2.1
<b>Hyperlink</b> <input type="checkbox"/> Datei nicht kopieren <input type="checkbox"/> Datei auf Server kopieren <input checked="" type="checkbox"/> Datei auf Server kopieren und löschen		<b>Speicherpfad</b> <input checked="" type="checkbox"/> TurboMed\Dokumente <input type="checkbox"/> Anderer [Dropdown] <input checked="" type="checkbox"/> JahrMonat	
<b>Karteieintrag</b> <input checked="" type="checkbox"/> Karteieintrag nach Typ		<b>Dateiimportpfad</b> C:\GDT [Dropdown]	